



## Manual de Instruções

### INSTRUÇÕES DE USO - ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA - AXMED



1601 - Aspirador para Vácuo - 500ml



1601/P - Aspirador tipo Venturi para Oxigênio



1603 - Aspirador tipo Venturi para Ar Comprimido



1702 - Aspirador com frasco de 03 litros



1703 - Aspirador com frasco de 05 litros

### INDICAÇÃO

Os aspiradores são indicados para procedimentos de aplicação de sucção de materiais semi-líquidos através de ação de fluxo contínuo de Oxigênio, Ar Comprimido e Vácuo.

Funcionam a partir de uma conexão que acoplada a um posto medicinal (Oxigênio, Vácuo ou Ar Comprimido) onde permite regular a vazão para sucção.

Quando o Oxigênio ou Ar Comprimido são administrados internamente, no corpo do aspirador, resulta por ação do conjunto do corpo (Venturi) em uma pressão inferior a atmosférica (Vácuo).

## **INSTRUÇÕES DE USO**

- 1 - Antes de conectar os aspiradores a uma rede, certifique-se:
  - Limpeza do aparelho
  - Ausência de óleos
  - Desobstrução dos conectores de entrada e saída
  - Botão do aspirador fechado
- 2 - Conecte na conexão do aspirador em um posto medicinal, certifique-se de que está firmemente posicionado
- 3 - Conecte na conexão de saída na extremidade do tubo de aspiração e a outra extremidade na sonda do paciente
- 4 - Gire o botão no sentido anti-horário e observe o tubo de aspiração
- 5 - Verifique o volume do material aspirado, para que não exceda o nível máximo
- 6 - Para interromper o uso por ter atingido o nível máximo, gire o botão no sentido horário para que o processo seja interrompido
- 7 - Para remover o material coletado, tire o frasco da tampa do aspirador e descarte o material coletado em local próprio para descarte
- 8 - Para utilizá-lo novamente, limpe o frasco previamente e esterilize

## **EMBALAGEM**

Os aspiradores para rede canalizada são embalados individualmente e colocados em caixas de papelão

## **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Os aspiradores para rede canalizada devem ser armazenados e transportados em temperatura ambiente, ao abrigo de calor e umidade.

Deverão ser transportado tomando-se os devidos cuidados para evitar choques mecânicos, calor e umidade.

Evitar exposição prolongada ao calor e frio extremos.

## **LIMPEZA**

O aspirador para rede canalizada deve-se passar por uma limpeza prévia com água e sabão. Deixar secar em ambiente limpo antes de proceder a desinfecção ou esterelização.

## **ESTERELIZAÇÃO**

Entre pacientes fazer a desinfecção, imergindo preferencialmente em Glutaraldeído 2% por 60 minutos, enxaguar abundantemente com água, secar e guardar em local limpo e seco.

## GARANTIA

O fabricante assegura ao proprietário do produto Nota Fiscal de Compra e a garantia contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 365 dias, a partir da data de aquisição desde que, o defeito seja constatado por seu técnico autorizado.

Validade indeterminada enquanto embalagem intacta.

Na execução da mão-de-obra e substituição de peças com defeito uma vez que esteja dentro do prazo de garantia e com o uso adequado do equipamento.

Será considerada **NULA A GARANTIA**, nas seguintes situações.

Se o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente ou agentes da natureza.

For constatado mau uso do equipamento, isto é, em desacordo com o Manual de Instruções, ou ainda, sinais de

violação consequente de consertos não autorizados pelo fabricante.

Se o consumidor final não apresentar Nota Fiscal ou se a mesma estiver danificada.

Finalmente, a ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME, se compromete na prestação dos serviços aqui descritos, esclarecendo também, que o cliente será responsável pelas despesas de deslocamento do produto.

FABRICADO POR:

ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME

CNPJ: 08.406.353/0001-06 - Inscrição Estadual: 149.486.956.110

Rua Brasil, 120 - Americanópolis - São Paulo /SP

CEP 04428-060 - Tel.: 55.11.5642-0302

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Argeu Dantas Junior - CRF/SP 69.032

RESPONSÁVEL LEGAL: Alexandre Assunção Bastos



**DISTRIBUIDO POR:**

AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Rua Dona Aurora Alegretti, 81 - Jardim Caravelas

CEP 04728-090 - Tel.: 55.11.5642-0302 e Fax: 55.11.5641-6213

[www.axmed.com.br](http://www.axmed.com.br) e-mail: [axmed@axmed.com.br](mailto:axmed@axmed.com.br)

Registro ANVISA Nº.804.136.29001