



Manual de Instruções

INSTRUÇÕES DE USO - CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA - AXMED



2408 - Conjunto de nebulização contínua de Oxigênio

COMPOSIÇÃO

Composto por 01 Macronebulizador de 500ml frasco em policarbonato, 01 traquéia de 1,20cm lisa interna corrugada externa e 01 máscara facial em PVC adulto ou infantil.

INDICAÇÃO

Indicado para procedimentos de aplicação de Oxigênio por via inalatória para pacientes em terapia intensiva com ou sem medicação nas vias aéreas superiores.

- Afecções inflamatórias agudas e crônicas das vias aéreas.
- Pós-operatórios.
- Deve ser manipulado apenas por pessoas qualificadas

LIMPEZA

O conjunto de nebulização deve ser lavado com água e sabão e seguir para a esterelização.

ESTERELIZAÇÃO

A limpeza e desinfecção de alto nível com Glutaraldeído 2% por 60 minutos, a cada 24 horas em um mesmo paciente..

Após passar por desinfecção, o conjunto de nebulização deve ser enxaguado abundantemente em água corrente, secar e ser acondicionado em local limpo. A esterelização das traqueias em PVC com óxido de etileno deve obedecer parâmetros de temperatura a 54°C, a esterelização química por imersão pode ser realizada com Glutaraldeído 2% por 12 horas. Enxague com água destilada para eliminar as altas concentrações de substâncias químicas utilizadas, deixando secar em ambiente limpo e seco. As traquéias em silicone devem ser autoclavadas por 15 minutos a 121°C ou 4 minutos a 134°C.

EMBALAGEM

Os conjuntos para nebulização contínua são embalados individualmente em embalagem plástica e colocados em caixas de papelão.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Os conjuntos para nebulização contínua devem ser armazenados e transportados em temperatura ambiente, ao abrigo de calor e umidade. Devem ser transportados tomando-se os devidos cuidados para evitar choques mecânicos, calor e umidade. Evitar exposição prolongada ao calor e frio extremos.

GARANTIA

O fabricante assegura ao proprietário do produto a garantia contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 365 dias, a partir da data de aquisição desde que, o defeito seja constatado por seu técnico autorizado.

O fabricante assegura também, a execução de mão-de-obra e substituição de peças com defeito uma vez que esteja dentro do prazo de garantia e com o uso adequado do equipamento.

O fabricante considerará **NULA A GARANTIA**, nas seguintes situações.

-Quando o produto sofre qualquer dano provocado por acidente ou agentes da natureza.

-For constatado mau uso do equipamento, isto é, em desacordo com o Manual de Instruções, ou ainda, sinais de violação consequentes de consertos não autorizados pelo fabricante.

-Se o consumidor final apresentar Nota Fiscal de Compra com rasuras e /ou danificada, ou ainda não apresentá-la.

Finalmente, a ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME, se compromete na prestação dos serviços aqui descritos, esclarecendo também, que o cliente será responsável pelas despesas de deslocamento do produto.

FABRICADO POR:

ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME

CNPJ: 08.406.353/0001-06 - Inscrição Estadual: 149.486.956.110

Rua Brasil, 120 - Americanópolis - São Paulo /SP

CEP 04428-060 - Tel.: 55.11.5642-0302

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Argeu Dantas Junior - CRF/SP 69.032

RESPONSÁVEL LEGAL: Alexandre Assunção Bastos



DISTRIBUIDO POR:

AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Rua Dona Aurora Alegretti, 81 - Jardim Caravelas

CEP 04728-090 - Tel.: 55.11.5642-0302 e Fax: 55.11.5641-6213

www.axmed.com.br e-mail: axmed@axmed.com.br

Registro ANVISA Nº.804.136.20003