



Manual de Instruções

INSTRUÇÕES DE USO - FLUXÔMETRO - AXMED



1100 - Fluxômetro para Oxigênio



1101 - Fluxômetro para Ar Comprimido

INDICAÇÃO

Os Fluxômetros são indicados para controlar e indicar o fluxo do gás medicinal que está em uso como: Oxigênio, Ar Comprimido. O Fluxômetro pode ser conectado as válvulas de regulação, aos equipamentos onde há necessidade de controle e regulação de fluxo de gás fornecido para os equipamentos médicos. Verifique o gás a ser utilizado através das cores bem como o fluxo necessário.

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de utilizar o Fluxômetro, certifique-se:

1. O fluxômetro esteja limpo.
2. O fluxômetro que será utilizado está de acordo com o gás, verificando a identificação da cor do botão de regulagem do fluxo e a etiqueta colada no corpo do fluxometro.
3. Está livre de graxas, óleos ou outras substâncias.
4. **O botão de regulagem deve estar fechado.**
5. Antes de conectar a válvula na rede, abra ligeiramente a válvula do cilindro ou acione o pino de impacto da rede para expurgar sujeiras
6. Verifique se o regulador utilizado possui faixas de pressão adequadas à aplicação, bem como apropriada para o gás em uso.
7. Use somente a pressão recomendada.
8. Verifique se não há vazamento do gás utilizado.
9. Após a operação desejada, fechar o botão de regulagem.

Quando na utilização do cilindro:

1. Abra a válvula de regulagem.
2. Aguarde até que o manômetro do regulador indique a pressão do cilindro (manômetro de alta pressão) indique que a leitura zero. Gire então a válvula de regulagem no sentido anti-horário até que o mesmo fique totalmente livre ou feche a válvula de regulagem do fluxômetro se for o caso.
3. Feche a válvula de controle de gás do equipamento conectado ao regulador:
 - Quando detectar risco de contaminação, deve efetuar a limpeza adequada para reutilizá-lo.
 - Quando for necessária a distribuição a partir de um ponto, utilize a tomada dupla ou tripla de acordo com a aplicação.

LIMPEZA

Para manter o produto limpo e em bom estado de conservação será necessário limpá-lo com pano limpo e macio, umedecido em solução de água e sabão neutro. Após limpeza, remova os resíduos com pano umedecido em água.

Não utilize álcool, álcool isopropílico e derivados, para limpar o equipamento porque danifica as peças plásticas.

ESTERELIZAÇÃO

Em caso de uso que possa ocorrer contaminação, proceda a desinfecção antes de reutilizá-lo. Utilize Glutaraldeído 2% por 60 minutos ou óxido de etileno, com temperatura abaixo de 60°C.

O produto não suporta temperaturas acima de 60°C, logo, não deve ser submetido em autoclave.

EMBALAGEM

Embalados individualmente em embalagem plástica, logo após em caixa de papelão.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento é um instrumento de precisão, não deve jamais ser exposto a choques, vibrações ou impactos repentinos.

Armazene e transporte o produto em local arejado, a temperatura ambiente e longe do calor e umidade. Deve ser manuseado e transportado com cuidado, pois contém parte frágil.

GARANTIA

O fabricante assegura ao proprietário do produto a garantia contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 365 dias, a partir da data de aquisição desde que, o defeito seja constatado por seu técnico autorizado.

O fabricante assegura também, a execução de mão-de-obra e substituição de peças com defeito uma vez que esteja dentro do prazo de garantia e com o uso adequado do equipamento.

O fabricante considerará **NULA A GARANTIA**, nas seguintes situações.

- Quando o produto sofre qualquer dano provocado por acidente ou agentes da natureza.
- For constatado mau uso do equipamento, isto é, em desacordo com o Manual de Instruções, ou ainda, sinais de violação consequentes de consertos não autorizados pelo fabricante.
- Se o consumidor final apresentar Nota Fiscal de Compra com rasuras e /ou danificada, ou ainda não apresentá-la.

Finalmente, a ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME, se compromete na prestação dos serviços aqui descritos, esclarecendo também, que o cliente será responsável pelas despesas de deslocamento do produto.

FABRICADO POR:

ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME
CNPJ: 08.406.353/0001-06 - Inscrição Estadual: 149.486.956.110
Rua Brasil, 120 - Americanópolis - São Paulo /SP
CEP 04428-060 - Tel.: 55.11.5642-0302
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Argeu Dantas Junior - CRF /SP 69.032
RESPONSÁVEL LEGAL: Alexandre Assunção Bastos



DISTRIBUIDO POR:

AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Dona Aurora Alegretti, 81 - Jardim Caravelas
CEP 04728-090 - Tel.: 55.11.5642-0302 e Fax: 55.11.5641-6213
www.axmed.com.br e-mail: axmed@axmed.com.br
Registro ANVISA N°.804.136.29002