



Manual de Instruções

INSTRUÇÕES DE USO - TOMADA DUPLA - AXMED



1400/O - Tomada Dupla de Oxigênio



1400/AR - Tomada Dupla de Ar Comprimido



1403 - Tomada Dupla de Vácuo



1402 - Tomada Dupla de Óxido Nitroso

INDICAÇÃO

As tomadas duplas são indicadas para distribuir ou multiplicar os pontos da rede de gases: Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso.

Antes de conectar a tomada ao ponto de consumo certifique-se:

- Que a tomada esteja limpa
- Esteja livre de graxas e Óleos
- A conexão e identificação da rede de gás a ser utilizado
- Não existe vazamentos

INSTRUÇÕES DE USO

1. Conectar a tomada ao ponto de consumo
2. Conectar a um ponto dos niples o equipamento
3. Verificar existência de vazamentos utilizando solução de água e sabão
4. Não utilizar óleo ou graxas, os equipamentos que operam com Oxigênio, não devem ser lubrificados
5. Limpar utilizando pano macio embebido em solução de água e sabão neutro
6. Antes e depois da utilização limpe e faça a desinfecção
7. Certifique-se que a tomada a ser utilizada está de acordo com o tipo de gases, a identificação na cor verde para Oxigênio, amarela para Ar Comprimido, azul para Óxido Nitroso e cinza para Vácuo.

LIMPEZA

Para manter o produto limpo e em bom estado de conservação será necessário limpar com pano limpo e macio, umedecido em solução de água e sabão neutro. Após a limpeza, remova os resíduos com pano umedecido em água.

Não utiliza álcool, álcool isopropílico e derivados para limpar o equipamento, porque danifica as peças plásticas.

ESTERELIZAÇÃO

As tomadas duplas devem passar por processo de desinfecção antes de ser utilizada.

Utilize solução de Glutaraldeído 2%. Faça a limpeza externa da tomada com auxílio de um pano embebido em solução de Glutaraldeído após guarde a tomada em local limpo e seco até sua utilização.

EMBALAGEM

Embalados individualmente em embalagem plástica, logo após em caixa de papelão.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento é um instrumento de precisão, não deve jamais ser exposto a choques, vibrações ou impactos repentinos.

Armazene e transporte o produto em local arejado, a temperatura ambiente e longe do calor e umidade. Deve ser manuseado e transportado com cuidado, pois contém parte frágil.

GARANTIA

O fabricante assegura ao proprietário do produto a garantia contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 365 dias, a partir da data de aquisição desde que, o defeito seja constatado por seu técnico autorizado.

O fabricante assegura também, a execução de mão-de-obra e substituição de peças com defeito uma vez que esteja dentro do prazo de garantia e com o uso adequado do equipamento.

O fabricante considerará **NULA A GARANTIA**, nas seguintes situações.

-Quando o produto sofre qualquer dano provocado por acidente ou agentes da natureza.

-For constatado mau uso do equipamento, isto é, em desacordo com o Manual de Instruções, ou ainda, sinais de violação consequentes de consertos não autorizados pelo fabricante.

-Se o consumidor final apresentar Nota Fiscal de Compra com rasuras e /ou danificada, ou ainda não apresentá-la.

Finalmente, a ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME, se compromete na prestação dos serviços aqui descritos, esclarecendo também, que o cliente será responsável pelas despesas de deslocamento do produto.

FABRICADO POR:

ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME
CNPJ: 08.406.353/0001-06 - Inscrição Estadual: 149.486.956.110
Rua Brasil, 120 - Americanópolis - São Paulo /SP
CEP 04428-060 - Tel.: 55.11.5642-0302
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Argeu Dantas Junior - CRF/SP 69.032
RESPONSÁVEL LEGAL: Alexandre Assunção Bastos

**DISTRIBUIDO POR:**

AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Dona Aurora Alegretti, 81 - Jardim Caravelas
CEP 04728-090 - Tel.: 55.11.5642-0302 e Fax: 55.11.5641-6213
www.axmed.com.br e-mail: axmed@axmed.com.br
Registro ANVISA N°.804.136.29002