




Manual de Instruções

INSTRUÇÕES DE USO - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO - AXMED



1200 - Válvula reguladora para cilindro de Oxigênio com 01 saída

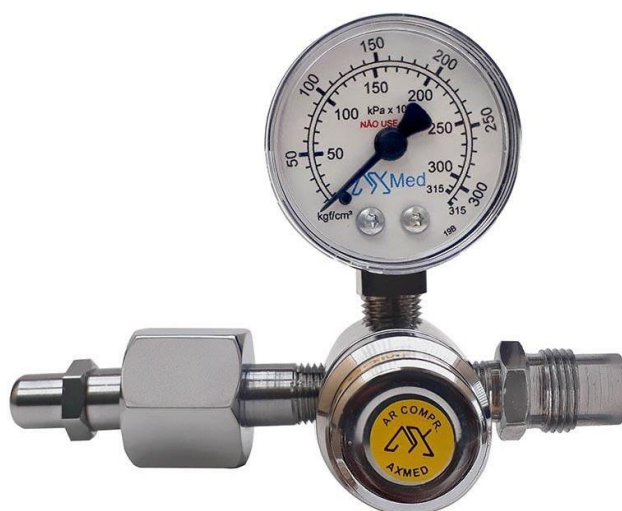

1201 - Válvula reguladora para cilindro de Ar Comprimido com 01 saída

INDICAÇÃO

As Válvulas Reguladoras para Cilindro são indicadas para regular a pressão do cilindro de gases medicinais, com a finalidade de reduzir a pressão de saída do cilindro à pressão fixa de **3,5kgf/cm² a 4,0kgf/cm²**.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Conectar ao registro do cilindro de gás medicinal através da porca de entrada, certificando -se das conexões e das cores correspondentes aos gases medicinais, segundo norma ABNT (Verde=Oxigênio, Amarelo=Ar Comprimido). Certifique-se de que foi limpo adequadamente segundo instruções de limpeza. As conexões seguem a normas de ABNT.
2. Conecte a porca de entrada ao registro do cilindro de gás medicinal usando chave de 1.1/8
3. Verifique possíveis aparições de bolha, para constatar vazamentos, na região da conexão de entrada utilizando um pincel umedecido com água e sabão neutro. Caso exista o vazamento, feche o registro do cilindro, despressurize o regulador e aperte com chave a conexão de entrada até obter uma perfeita vedação.
4. Instale o equipamento à ser utilizado na conexão de saída para consumo.
5. Abra lentamente o registro do cilindro, e o manômetro, indicará a pressão ndo cilindro.
6. **Após o uso feche o registro do cilindro e despressurize o regulador de pressão.**

A válvula reguladora para cilindro é instalada no cilindro através do cabo.

LIMPEZA

Para manter o produto limpo é necessário limpá-lo com pano limpo e macio, umedecido em solução de água e sabão neutro. Após a limpeza, remova os resíduos com pano umedecido em água. Não utilize álcool, álcool isopropílico e derivados para limpar o equipamento, por que danifica as peças plásticas.

ESTERELIZAÇÃO

Em caso de uso que possa ocorrer contaminação, proceda a desinfecção antes de reutiliza-lo. Utilize Glutaraldeido 2% por 60 minutos ou óxido de etileno, com temperatura abaixo de 60°C. O produto não suporta temperaturas acima de 60°C, logo, não deve ser submetido em autoclave.

EMBALAGEM

Embalados individualmente em embalagem plástica, logo após em caixa de papelão.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento é um instrumento de precisão, não deve jamais ser exposto a choques, vibrações ou impactos repentinos. Armazene e transporte o produto em local arejado, a temperatura ambiente e longe do calor e umidade. Deve ser manuseado e transportado com cuidado, pois contém parte frágil.

GARANTIA

O fabricante assegura ao proprietário do produto a garantia contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 365 dias, a partir da data de aquisição desde que, o defeito seja constatado por seu técnico autorizado.

O fabricante assegura também, a execução de mão-de-obra e substituição de peças com defeito uma vez que esteja dentro do prazo de garantia e com o uso adequado do equipamento.

O fabricante considerará **NULA A GARANTIA**, nas seguintes situações.

-Quando o produto sofre qualquer dano provocado por acidente ou agentes da natureza.

-For constatado mau uso do equipamento, isto é, em desacordo com o Manual de Instruções, ou ainda, sinais de violação consequentes de consertos não autorizados pelo fabricante.

-Se o consumidor final apresentar Nota Fiscal de Compra com rasuras e /ou danificada, ou ainda não apresentá-la.

Finalmente, a ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME, se compromete na prestação dos serviços aqui descritos, esclarecendo também, que o cliente será responsável pelas despesas de deslocamento do produto.

FABRICADO POR:

ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME

CNPJ: 08.406.353/0001-06 - Inscrição Estadual: 149.486.956.110

Rua Brasil, 120 - Americanópolis - São Paulo /SP

CEP 04428-060 - Tel.: 55.11.5642-0302

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Argeu Dantas Junior - CRF/SP 69.032

RESPONSÁVEL LEGAL: Alexandre Assunção Bastos



DISTRIBUIDO POR:

AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Rua Dona Aurora Alegretti, 81 - Jardim Caravelas

CEP 04728-090 - Tel.: 55.11.5642-0302 e Fax: 55.11.5641-6213

www.axmed.com.br e-mail: axmed@axmed.com.br

Registro ANVISA N°.804.136.29002