



Manual de Instruções

INSTRUÇÕES DE USO - ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA - AXMED



1601 - Aspirador para Vácuo - 500ml




1602 - Aspirador tipo Venturi para Oxigênio



1603 - Aspirador tipo Venturi para Ar Comprimido



1700 - Aspirador com frasco de 03 Lts

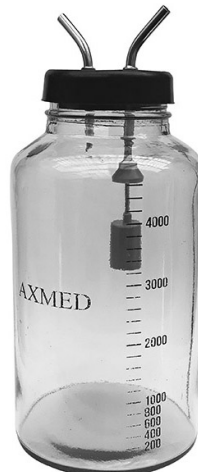

1701 - Aspirador com frasco de 05 litros

PRODUTO

O aspirador para rede canalizada é um produto médico-hospitalar, elaborado visando aliar tecnologia e facilidade de manuseio em ambientes hospitalares.

Os frascos dos aspiradores para rede canalizada podem ser solicitados em vidros ou em plástico (polipropileno). E são apresentados em 3 modelos das redes de gases para oxigênio, ar comprimido medicinal ou para vácuo. A diferença entre os modelos será o modelo de gases e do frasco.



INDICAÇÃO

Os aspiradores são indicados para procedimentos de aplicação de sucção de materiais semi-líquidos através de ação de fluxo contínuo de Oxigênio, Ar Comprimido e Vácuo.

Funcionam a partir de uma conexão que acoplada a um posto medicinal (Oxigênio, Vácuo ou Ar Comprimido) onde permite regular a vazão para sucção.

Quando o Oxigênio ou Ar Comprimido são administrados internamente, no corpo do aspirador, resulta por ação do conjunto do corpo (Venturi) em uma pressão inferior a atmosférica (Vácuo).

INSTRUÇÕES DE USO

1. Antes de conectar os aspiradores a uma rede, certifique-se:
 - Limpeza do aparelho;
 - Ausência de óleos;
 - Desobstrução dos conectores de entrada e saída;
 - Botão do aspirador fechado;
2. Conecte na conexão do aspirador em um posto medicinal, certifique-se de que está firmemente posicionado.
3. Conecte na conexão de saída na extremidade do tubo de aspiração e a outra extremidade na sonda do paciente.
4. Gire o botão no sentido anti-horário e observe o tubo de aspiração.
5. Verifique o volume do material aspirado, para que não exceda o nível máximo.
6. Para interromper o uso por ter atingido o nível máximo, gire o botão no sentido horário para que o processo seja interrompido.
7. Para remover o material coletado, tire o frasco da tampa do aspirador e descarte o material coletado em local próprio para descarte.
8. Para utilizá-lo novamente, limpe o frasco previamente e esterilize.

EMBALAGEM

Os aspiradores para rede canalizada são embalados individualmente e colocados em caixas de papelão.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Os aspiradores para rede canalizada devem ser armazenados e transportados em temperatura ambiente, ao abrigo de calor e umidade.

Deverão ser transportados tomando-se os devidos cuidados para evitar choques mecânicos, calor e umidade.

Evitar exposição prolongada ao calor e frio extremos.

LIMPEZA

- A limpeza deve ser feita em solução de água e sabão neutro.
- Deixe secar em ambiente limpo e seco

ESTERILIZAÇÃO

Deve-se adotar o método de desinfecção de alto nível para destruir todas as bactérias vegetativas, fungos, vírus e parte dos esporos.

ÁCIDO PARACÉTICO

Prepare a solução de Ácido Peracético a 1% para desinfecção de alto nível, seguindo rigorosamente as instruções do fabricante. O item a ser desinfetado deve permanecer totalmente imerso na solução por um período de 15 minutos, utilizando luvas de proteção durante todo o processo. Após esse tempo, enxágue o material com água estéril e deixe-o secar em temperatura ambiente ou em secadora, por no máximo 15 minutos. Em seguida, monte o produto e armazene-o adequadamente, garantindo sua proteção contra contaminação até o momento da utilização

ATENÇÃO:

..A esterilização deve ser feita com o circuito desmontado

- O frasco de **VIDRO** não suporta temperaturas superiores a 60°C a 15 minutos e será danificado.
- O Frasco de Polipropileno **NÃO DEVE** ser submetido a autoclave, pois não suporta a temperatura deste processo e será danificado.
- A tampa do Aspirador e a bóia de segurança **NÃO DEVEM** ser submetidos a autoclave, pois não suportam as temperaturas deste processo e serão danificados.

DESCARTE DO PRODUTO

Os arpiradores para rede canalizada Axmed **NÃO PODEM** ser descartadas em lixo comum ao final de sua vida útil, embora não haja riscos de contaminação enquanto o equipamento estiver em uso normal.

Descarte conforme a RDC nº 222, de 28 de março de 2018 e com os regulamentos ambientais e médicos locais.

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS

Este equipamento só deve ser operado por pessoas (Qualificadas).

Certifique-se de que o gás a ser utilizado é o indicado para o produto. Verde só pode ser utilizado para Oxigênio. Amarelo só pode ser utilizado para Ar Comprimido. Azul só pode ser utilizado para Óxido Nitroso. E Cinza só pode ser utilizado para Vácuo.

NÃO FUME na área onde o equipamento é utilizado.

Os equipamentos que utilizam O₂ **NÃO PODEM SER** lubrificados, portanto nunca utilize óleos, graxas, hidrocarbonatos etc.

Não utilize o equipamento caso haja fissuras ou rachaduras nas partes plásticas.

Não tente fazer quaisquer reparos no equipamento. Sua manutenção só deverá ser realizada por pessoas autorizadas e com peças originais AXMEDICAL. Em caso de mal funcionamento ou vazamento não solucionável com o aperto das conexões, **suspenda** o uso do produto e entre em contato com a assistência do fabricante.

Só utilize este equipamento em perfeitas condições. Qualquer anormalidade contatar imediatamente o serviço de assistência técnica. Não utilize este equipamento para qualquer outra função que não a especificada neste manual.

A não observância destas precauções será considerada como um mau uso do equipamento.

GARANTIA

O fabricante assegura ao proprietário do produto constante de Nota Fiscal de Compra, a garantia contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 365 dias, a partir da data de aquisição desde que, o defeito seja constatado por seu técnico autorizado.

Validade indeterminada enquanto embalagem intacta.

Na execução de mão-de-obra e substituição de peças com defeito uma vez que esteja dentro do prazo de garantia e com o uso adequado do equipamento.

O fabricante considerará **NULA A GARANTIA**, nas seguintes situações:

- Quando o produto sofre qualquer dano provocado por acidente ou agentes da natureza.
- For constatado mau uso do equipamento, isto é, em desacordo com o Manual de Instruções, ou ainda, sinais de violação consequentes de consertos não autorizados pelo fabricante.
- Se o consumidor final apresentar Nota Fiscal de Compra com rasuras e /ou danificada, ou ainda não apresentá-la.

Finalmente, a **AXMEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**, se compromete na prestação dos serviços aqui descritos, esclarecendo também, que o cliente será responsável pelas despesas de deslocamento do produto.

FABRICADO POR:

AXMEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 08.406.353/0001-06 - Inscrição Estadual: 149.486.956.110

Rua Brasil, 120 - Americanópolis - São Paulo /SP

CEP 04428-060 - Tel.: 55.11.5642-0302

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Joyce Belga Cavalcante CRF-SP: 85089

RESPONSÁVEL LEGAL: Alexandre Assunção Bastos

Notificação ANVISA Nº.804.136.29001



DISTRIBUIDO POR:

AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 04.130.211/0001-08 IE: 116.117.701.116

Rua Dona Aurora Alegretti, 81 - Jardim Caravelas

CEP 04728-090 - Tel.: 55.11.5642-0302 e Fax: 55.11.5641-6213

www.axmed.com.br e-mail: axmed@axmed.com.br

AFE: 8.02109-7 (U1L32L3XL2M6)